

規格・サイズ表

製品タイプ	つま先	色	サイズ	寸法(cm)			品番	JANコード	梱包単位	
				足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲				
ハイソックス	なし	ピュアベージュ	S	17~21	28~34	—	LSM001-SP	4547531349940	1足/箱	
			M	19~23	32~38	—	LSM001-MP	4547531349926		
			L	21~25	36~42	—	LSM001-LP	4547531349902		
			LL	23~27	40~46	—	LSM001-LLP	4967162942936		
		ブラック	S	17~21	28~34	—	LSM001-SB	4547531349957		
			M	19~23	32~38	—	LSM001-MB	4547531349933		
	あり	ピュアベージュ	L	21~25	36~42	—	LSM001-LB	4547531349919		
			LL	23~27	40~46	—	LSM001-LLB	4967162942929		
			ブラック	S	17~21	28~34	—	LSM002-SP		4547531350007
				M	19~23	32~38	—	LSM002-MP		4547531349988
		グレー	L	21~25	36~42	—	LSM002-LP	4547531349964		
			LL	23~27	40~46	—	LSM002-LLP	4967162942950		
ストッキング	なし	ピュアベージュ	S	17~21	28~34	44~53	LSM005-SP	4548366407478		
			M	19~23	32~38	47~56	LSM005-MP	4548366407454		
			L	21~25	36~42	50~59	LSM005-LP	4548366407430		
			LL	23~27	40~46	—	LSM002-LLB	4967162942943		
		ブラック	S	17~21	28~34	44~53	LSM005-SB	4548366407461		
			M	19~23	32~38	47~56	LSM005-MB	4548366407447		
	あり	ピュアベージュ	L	21~25	36~42	50~59	LSM005-LB	4548366405672		
			LL	23~27	40~46	—	LSM002-LG	4548366282099		
			ブラック	S	17~21	28~34	44~53	LSM006-SP	4547531860162	
				M	19~23	32~38	47~56	LSM006-MP	4547531860155	
		ブラック	L	21~25	36~42	50~59	LSM006-LP	4547531860148		
			LL	23~27	40~46	—	LSM006-SB	4548366262398		
ブラック	M	19~23	32~38	47~56	LSM006-MB	4548366262381				
	L	21~25	36~42	50~59	LSM006-LB	4548366262374				

販売名：レッグサイエンス舞
届出番号：26B1X00010000027

使用方法

1 ストッキングに手を入れて、内側からかかと部をつまんでください。

2 かかと部をつまんだまま手を引き抜き、ストッキングを裏返しにしてください。その際、かかと部から足先部は裏返さず残してください。

3 ストッキングのかかと部が下になるように、両手でストッキングの端を持ち、つま先からかかとまで履いてください。

4 かかとの位置を正確に合わせ、しわ・ねじれに注意し、膝下まで少しずつたくし上げてください。

矢印の位置で止めてください。

はく位置に注意!

ご使用にあたっては、添付文書を必ずお読みください。

JMS 販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス <http://www.jms.cc>
■お問い合わせ先 カスタマーサポートセンター 0120-923-107

GUNZE 製造販売業者
Gunze株式会社 <http://www.gunze.co.jp/>
〒623-8513 京都府綾部市青野町薬ヶ市46

2018.05.10XD064-UP
2020.09.05XD064-UP

人と医療のあいだに...
JMS

医療用弾性ストッキング

レッグサイエンス

Leg Science Mai

舞

レッグサイエンス 舞


グンゼ製 (日本製) で 圧迫圧:27-40hPa / 20-30mmHg の

肌触りが良く、はきやすい 医療用弾性ストッキングです。



お肌にやさしい

考え抜いた生地設計で、滑らかで柔らかい肌ざわりを実現し、通気性も良好。お肌へのやさしさを表す一つの目安としてJISの規格である培養ヒト皮膚モデル法*による試験を実施しています。

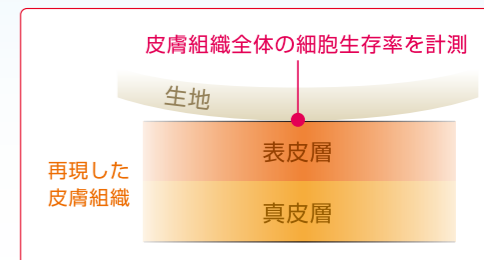


*培養ヒト皮膚モデル法
JISで制定されている繊維製品の皮膚一次刺激性試験方法。培養皮膚モデルに製品を接触させて、製品による皮膚への化学的刺激を評価します。

優れたフィット感

日本人の体型を分析し、足首・ふくらはぎ周長、膝下長など細部にわたりより多くの日本人の体型をカバーした設計です。



伸縮性があり、日本人の体型にしっかりフィット!

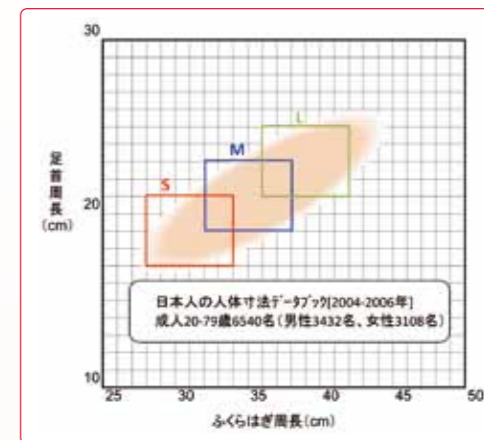


(社)人間生活工学研究センター
「日本人の人体寸法データブック2004-2006」より引用

高い耐久性

ネットに入れて洗濯機で洗えます。ホームケアが簡単で毎日の使用に嬉しい生地設計。かかとも補強しています。

洗濯機で洗えます!

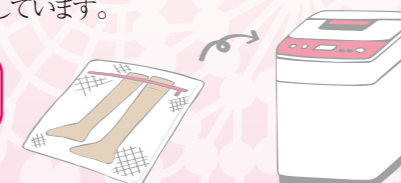

口ゴム部分の丸まり防止

口ゴム部分の丸まり防止

口ゴム部分の外側(肌に当たらない部分)に生地剛性の高い伸縮力のある太いナイロン糸を使用し、丸まりを防止しています。

ずり落ち対策

ずり落ち対策

蒸れや肌トラブルの原因となる素材を使用せず、すべり止め機能を持ったポリウレタン糸を内側に編み込み、ずり落ちを軽減しています。

はき心地

はき心地

口ゴム部分の幅を広くすることで、強い締め付けがなく、はき心地が快適です。



わかりやすいサイズ表示

足先にサイズ表示があります。

