

規格・サイズ表

製品 タイプ	つま先	色	サイズ	寸 法 (cm)			品 番	JANコード	梱包単位
				足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲			
ハイソックス	なし	ピュアベージュ	S	17～21	28～34	—	LSM001-SP	4547531349940	1足／箱
			M	19～23	32～38	—	LSM001-MP	4547531349926	
			L	21～25	36～42	—	LSM001-LP	4547531349902	
			LL	23～27	40～46	—	LSM001-LLP	4967162942936	
		ブラック	S	17～21	28～34	—	LSM001-SB	4547531349957	
			M	19～23	32～38	—	LSM001-MB	4547531349933	
			L	21～25	36～42	—	LSM001-LB	4547531349919	
			LL	23～27	40～46	—	LSM001-LLB	4967162942929	
	あり	ピュアベージュ	S	17～21	28～34	—	LSM002-SP	4547531350007	
			M	19～23	32～38	—	LSM002-MP	4547531349988	
			L	21～25	36～42	—	LSM002-LP	4547531349964	
			LL	23～27	40～46	—	LSM002-LLP	4967162942950	
ストッキング	なし	ピュアベージュ	S	17～21	28～34	44～53	LSM005-SP	4548366407478	
			M	19～23	32～38	47～56	LSM005-MP	4548366407454	
			L	21～25	36～42	50～59	LSM005-LP	4548366407430	
			S	17～21	28～34	44～53	LSM005-SB	4548366407461	
		ブラック	M	19～23	32～38	47～56	LSM005-MB	4548366407447	
			L	21～25	36～42	50～59	LSM005-LB	4548366405672	
	あり	ピュアベージュ	S	17～21	28～34	44～53	LSM006-SP	4547531860162	
			M	19～23	32～38	47～56	LSM006-MP	4547531860155	
			L	21～25	36～42	50～59	LSM006-LP	4547531860148	
			S	17～21	28～34	44～53	LSM006-SB	4548366262398	
		ブラック	M	19～23	32～38	47～56	LSM006-MB	4548366262381	
			L	21～25	36～42	50～59	LSM006-LB	4548366262374	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名：レッグサイエンス舞 届出番号：13B1X00180G00025

使用方法

1



ストッキングに手を入れて、内側からかかと部をつまんでください。

2



かかと部をつまんだまま手を引き抜き、ストッキングを裏返しにしてください。その際、かかと部から足先部は裏返さず残してください。

3



ストッキングのかかと部が下になるように、両手でストッキングの端を持ち、つま先からかかとまで履いてください。

4



かかとの位置を正確に合わせ、しわ・ねじれに注意し、膝下まで少しずつたくし上げてください。



矢印の位置で止めてください。

は<位置に注意!

ご使用にあたっては、添付文書を必ずお読みください。



販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
お問い合わせ先
カスタマーサポートセンター
0120-923-107
https://www.jms.cc

GUNZE MEDICAL

製造販売業者
グンゼメディカル株式会社
〒105-7315 東京都港区東新橋 1 丁目 9 番 1 号 東京汐留ビルディング 15F

2018.05.10XD064-UP
2024.06.10XD064-RA

人と医療のあいだに…


医療用弾性ストッキング

レッグサイエンス

Leg Science Mai



レッグサイエンス 舞

グンゼ製

(日本製)

で 圧迫圧:27-40hPa／20-30mmHg の

肌触りが良く、はきやすい 医療用弾性ストッキングです。

下肢を適度な
強さで圧迫しながら
静脈・リンパ還流を
促します


足首から
上部に向かって
段階的に圧迫圧が
低くなる構造

ストッキング
タイプの特長

口ゴム部分内側にポリウレタン糸を
編みこんでいます

お肌に
やさしい

考え抜いた生地設計で、滑らかで柔らかい肌ざわりを実現し、通気性も良好。お肌へのやさしさを表す一つの目安としてJISの規格である培養ヒト皮膚モデル法※による試験を実施しています。

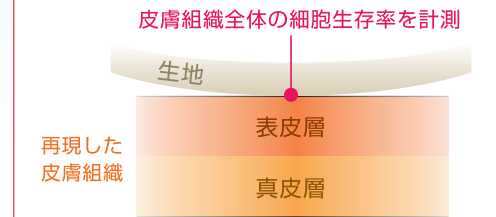


※培養ヒト皮膚モデル法
JISで制定されている繊維製品の皮膚一次刺激性試験方法。培養皮膚モデルに製品を接触させて、製品による皮膚への化学的刺激を評価します。

優れた
フィット感

日本人の体型を分析し、足首・ふくらはぎ周長、膝下長など細部にわたりより多くの日本人の体型をカバーした設計です。



伸縮性があり、日本人の体型にしっかりフィット!

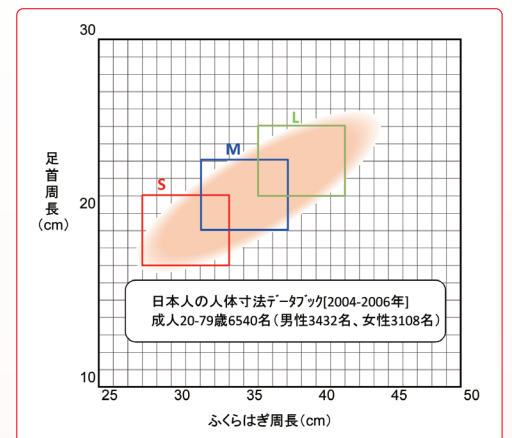


(社)人間生活工学研究センター
「日本人の人体寸法データブック2004-2006」より引用

高い
耐久性

ネットに入れて洗濯機で洗えます。
ホームケアが簡単で毎日の使用に嬉しい生地設計。
かかとも補強しています。

洗濯機で
洗えます!

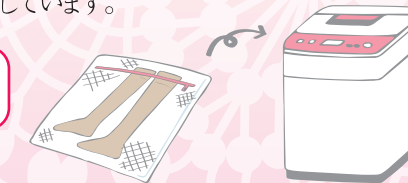

かかとを
補強!



口ゴム部分の丸まり防止

口ゴム部分の外側(肌に当たらない部分)に生地剛性の高い伸縮力のある太いナイロン糸を使用し、丸まりを防止しています。

ずり落ち対策

蒸れや肌トラブルの原因となる素材を使用せず、すべり止め機能を持ったポリウレタン糸を内側に編み込み、ずり落ちを軽減しています。

はき心地

口ゴム部分の幅を広くすることで、強い締め付けがなく、はき心地が快適です。



わかりやすい
サイズ表示

足先にサイズ表示があります。

