

耐久性

洗濯機対応可能な生地設計で、
ホームケアが簡単です。
かかと補強で、
さらに耐久性アップ。

肌へのこだわり

考え抜いた生地設計で
滑らかで柔らかい
肌触りを実現。

フィット感

日本人の体型を分析し、
足首・ふくらはぎ周長、
膝下長など細部に渡り、
より多くの日本人の
体型をカバーした設計。

着用方法



1 ストッキングに手を入れて、内側からかかと部をつまんでください。



2 かかと部をつまんだまま手を引き抜き、ストッキングを裏返しにしてください。その際、かかと部から足先部は裏返さず残してください。



3 ストッキングのかかと部が下になるように、両手でストッキングの端を持ち、つま先からかかとまで履いてください。



4 かかとの位置を正確に合わせ、しわ・ねじれに注意し、膝下まで少しずつたくし上げてください。



販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
お問い合わせ先
カスタマーサポートセンター 0120-923-107
<https://www.jms.cc>

GUNZE MEDICAL

製造販売業者
グンゼメディカル株式会社
〒105-7315 東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング 15F

2013.06.03XD066-LP
2024.06.10XD066-RA



人と医療のあいだに…
患者さま目線に立った
医療用弾性ストッキング

レッグサイエンス

Leg Science Mai



※本品は一般医療機器です。医師の指導のもとづいて、ご使用ください。

サイズ表

サイズ	寸法(cm)		
	足首周囲	ふくらはぎ周囲	大腿周囲
S	17~21	28~34	44~53
M	19~23	32~38	47~56
L	21~25	36~42	50~59
LL	23~27	40~46	—

サイズ表示




足裏にサイズ表示があります。

取扱い方法

- 40℃以下の水で洗濯機によるネット洗いが可能です。
- 乾燥機は使用せず、日陰でつり干ししてください。
- 繊維を傷める原因となりますので、塩素系漂白剤、アイロン、ドライクリーニングの使用はお控えください。

洗濯機で洗えます！

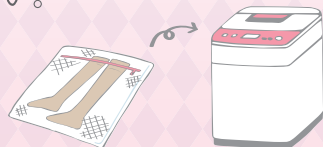

規格

タイプ	つま先	カラー	サイズ	品番
ハイソックス	なし	ピュア ベージュ	S	LSM001-SP
			M	LSM001-MP
			L	LSM001-LP
			LL	LSM001-LLP
		ブラック	S	LSM001-SB
			M	LSM001-MB
	L		LSM001-LB	
	LL		LSM001-LLB	
	あり	ピュア ベージュ	S	LSM002-SP
			M	LSM002-MP
			L	LSM002-LP
			LL	LSM002-LLP
ブラック		S	LSM002-SB	
		M	LSM002-MB	
	L	LSM002-LB		
	LL	LSM002-LLB		
圧迫圧：27-40hPa / 20-30mmHg				
梱包単位：1足/箱				
価格：3,600 円（税別）				

タイプ	つま先	カラー	サイズ	品番
ストッキング	なし	ピュア ベージュ	S	LSM005-SP
			M	LSM005-MP
			L	LSM005-LP
		ブラック	S	LSM005-SB
			M	LSM005-MB
			L	LSM005-LB
	あり	ピュア ベージュ	S	LSM006-SP
			M	LSM006-MP
			L	LSM006-LP
		ブラック	S	LSM006-SB
			M	LSM006-MB
			L	LSM006-LB
圧迫圧：27-40hPa / 20-30mmHg				
梱包単位：1足/箱				
価格：4,300 円（税別）				

一般的名称：弾性ストッキング 販売名：レッグサイエンス舞 届出番号：13B1X00180G00025

外観

患者さん目線に立って、肌触りにこだわりぬいた“ゲンゼ社製”のはきやすい中圧レベルの医療用弾性ストッキングです。

- ◎肌着メーカーゲンゼ社製ならではの肌触りとはきやすさを実現。
- ◎耐久性に優れ、ネット使用で洗濯機洗いも可能。
- ◎圧迫圧：27-40hPa/20-30mmHg。
- ◎日本人体型にフィットする設計。

ハイソックス



ストッキング



あなたの my stocking は

LSM _____ - _____

