

# 医療用弾性ストッキングQ&A

Q ずっとはいている方がいいの？


A

長時間の立ち仕事の方は、仕事  
できるだけ弾性ストッキングの着用  
をお勧めします。

静脈瘤の治療の後は、一般的に弾  
性ストッキングを着用します。

血栓性静脈炎や深部静脈血栓症な  
ど血栓の予防や、硬化療法後の  
静脈瘤の閉鎖に役立ち、静脈炎を  
軽減してくれるからです。

治療が終わった後も着用が必要か  
どうかは、医師に相談しましょう。

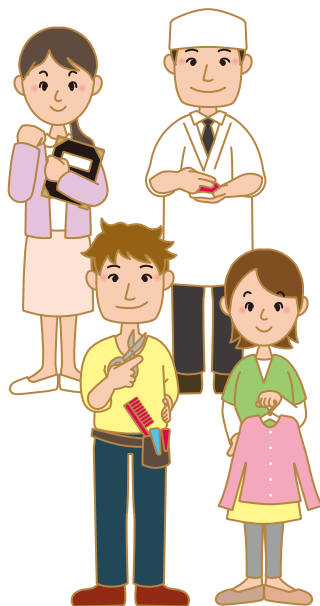

Q 皮膚トラブルはどうすればいいの？

A

かゆい症状が出たり、水疱ができた場合は、着用を中止し、医師に  
相談してください。

弾性ストッキングの着用によって皮膚がかゆくなる等、アレルギー  
性皮膚炎がおきることがあります。アレルギー体質の方は注意が  
必要です。また、擦れるなどが原因で水ぶくれ(水疱)ができること  
もあります。